

Případová studie: Zmenšení rozsahu nekrotické tkáně a zacelení bércevého vředu vzniklého v důsledku chronické žilní nedostatečnosti

Klinické výsledky aplikace obvazu Enluxtra®

Disney Macias,

zdravotní sestra (LPN) s certifikací pro péči o rány (WCCN, WCS);

MSc. Lucette Sabala,

registrovaná zdravotní sestra (RN), certifikovaná školitelka pro diabetiky (CDE);

Maureen DeSoria,

registrovaná zdravotní sestra (RN), doktorka práv (JD);

Dr. Jorge P. Amaya

Leon Medical Centers, Miami, Florida, USA.

Pacient/ka:

81letá žena s bérceovým vředem žilního původu na dolní končetině. Pacientka trpí četnými chronickými onemocněními.

A. Před zahájením léčby

Při příjmu byla rána pokryta žlutou nekrotickou tkání včetně černé suché nekrotické tkáně (angl. eschar). Tkáň v okolí rány byla červená a zanícená. Samoadaptivní krytí bylo umístěno na ránu a okolní tkáň a bylo zjištěno gázovým obvazem.



B. První týden

Rozsah nekrotické tkáně a macerace okolí rány byl viditelně zmenšený, okraje rány se zdály být zploštělé.



C. Šestý týden

Lůžko rány bylo z větší části červené a docházelo ke granulaci. Oblast suché nekrotické tkáně byla minimalizovaná.



D. Šestnáctý týden

Lůžko rány bylo výrazně červené, okraje rány byly ploché a stahovaly se ve směru do středu rány.



E. Po šesti měsících

Docházelo k re-epitelizaci tkáně, okolí rány bylo zdravé. Rána se zcela zahojila po 8 měsících.



F. Kontrola po dvou měsících od ukončení léčby

Po dvou měsících je rána stále zacelená a pokožka vypadá zdravě.

